

تم تصميم الاختبار السريع intelliswab covid19 (انتليساب) ليكون الاختبار الذاتي المناح الأكثر سهولة وسهل الاستخدام

إنه بسيط للغاية وسهل الاستخدام ويمكن استخدامه في أي مكان وفي أي وقت

توفر نتائج سهلة القراءة في 30 دقيقة فقط

سيشرح لك هذا الفيديو كيفية إجراء عملية الاختبار البسيطة خطوة بخطوة

ولكن تأكد من قراءة التعليمات المرفقة بالكامل قبل إجراء الاختبار

حسنًا ، ستجد بداخل مجموعة intelliswab على عدد ٢ كيس من الرقائق مغلقتين

يحتوي كل كيس من الرقائق على جهاز اختبار وأنبوب واحد

ستجد داخل مجموعة أدواتك أيضًا حامل اختبار للأنبوب ، وتعليمات كاملة للاستخدام باللغتين الإنجليزية والإسبانية ، وبطاقة مرجعية لنتائج الاختبار الإيجابية

قبل أن تبدأ تأكد من أن لديك طريقة لتحديد وقت الاختبار

بعد ذلك ، اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية ثم جففها

ثم ضع حامل الاختبار على سطح مستو مسطح

الآن قم بأخذ أحد الأكياس المكونة من جزئين

افتح الكيس الذي يحتوي على الأنبوب

قم بإخراجه وامسكه بشكل مستقيم

ثم انزع الغطاء برفق عن طريق هزّه للخلف وللأمام

لا تلمس ولا تسكب السائل

حرك الأنبوب في حامل الاختبار واتركه يرتاح بزاوية ، كما هو موضح

نفث أنفك برفق باستخدام منديل لتسهيل جمع العينات

لا تستخدم المناديل لتنظيف ممر الأنف

ثم اغسل يديك جيدًا

قم بإزالة جهاز الاختبار من كيس الرقائق وتأكد من عدم لمس طرف المسحة المسطحة بأصابعك

أدخل طرف المسحة المسطحة داخل فتحة الأنف

قم بتحريك طرف المسحة بحركة دائرية حول فتحة الأنف 15 مرة وحافظ على ملامستها للجدار الداخلي لفتحة الأنف

افعل الشيء نفسه مع فتحة الأنف الأخرى بتحريك طرف المسحة بحركة دائرية حوالي 15 مرة

قد تحصل على نتيجة خاطئة إذا لم تقم بمسح العدد الصحيح من المرات

بمجرد الانتهاء ، استمر في الضغط على حامل الاختبار بقوة وضع جهاز الاختبار في الأنبوب

قم بتدوير جهاز الاختبار 10 مرات لخلط عينة المسحة مع السائل الموجود في الأنبوب

تأكد من أن المسحة في اتجاه الجزء الخلفي من الأنبوب بحيث تلامس السائل

الآن فقط اترك الجهاز في الأنبوب بحيث تكون نافذة النتائج في مواجهتك والعصا بالكامل لأسفل في الأنبوب

ابدأ بتوقيت الوقت لمدة 30 دقيقة ولا تلمس الجهاز أو الأنبوب خلال هذا الوقت

عندما ترى خلفية وردية تمر من خلال نافذة النتائج ، ستعرف أنها تعمل

بعد 30 دقيقة ، اقرأ نتائجك وتذكر أن قراءة النتائج قبل 30 دقيقة أو بعد 40 دقيقة قد تسبب حصولك على نتائج خاطئة

الآن دعنا نلقي نظرة على كيفية قراءة نتائجك

يكون اختبارك سلبيًا إذا كان هناك خط بنفسجي ضارب إلى الأحمر بجوار الحرف C ولا يوجد خط بجوار الحرف t

يجب أن يكون هناك خط بجوار الحرف C لتتمكن من تفسير نتيجة سلبية

لديك نتيجة إيجابية إذا كان هناك خط بنفسجي ضارب إلى الأحمر بجوار الحرف t ولا يوجد خط بجوار الحرف C كما هو موضح هنا

لديك نتيجة إيجابية إذا كان هناك خط بجانب الحرف t وخط بجانب الحرف C ، حتى لو كان الخط C باهتًا كما هو موضح هنا

لديك أيضًا نتيجة إيجابية إذا كان هناك خط باهت بجوار t وخط بجانب C كما هو موضح هنا

نتيجتك غير صالحة في حالة عدم ظهور أي خطوط

إذا لم تكن الخطوط مكتملة أو إذا كانت الخلفية البنفسجية المحمرة تجعل من المستحيل قراءة الاختبار بعد 30 دقيقة

تذكر الرجوع إلى البطاقة المرجعية لنتائج الاختبار الإيجابية لمساعدتك في تفسير النتيجة بعد الاختبار

اتصل بمقدم الرعاية الصحية بطبيبك الخاص للإبلاغ عن نتيجتك إذا كانت نتيجة الاختبار الأولى سلبية

يجب عليك إجراء الاختبار مرة أخرى في غضون 24 إلى 36 ساعة باستخدام جهاز الاختبار الثاني

إذا كان كلا الاختبارين الأول والثاني سلبيين ، فقد لا تكون مصابًا بـ covid19

إذا لم تكن متأكدًا من نتيجتك ، فاتصل بنا على 1-833-601-0127

جعلت العلوم الذكية intelliswab بسيطة وسهلة